




ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο

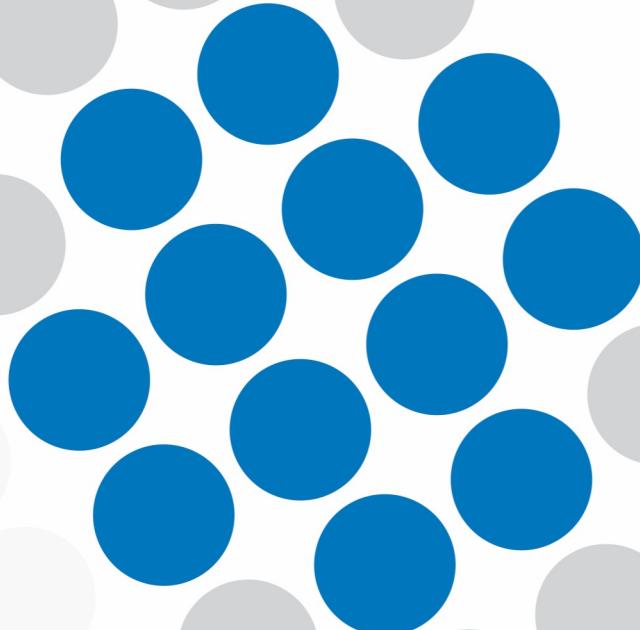

Οδηγίες Λήψης Δείγματος
για τον εξέχοντα κοπτικό Μικροβιώματος
με το FemoScan®

eshop.athenslab.gr

Οδηγίες Λήψης Δείγματος για τον έλεγχο του Κολπικού Μικροβιώματος με το FemoScan®

Πριν ξεκινήσετε

- Ελέγχετε προσεκτικά τα περιεχόμενα του κιτ. Αν λείπει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- Με το παρόν κιτ συλλογής μπορεί να συλλεχθεί δείγμα για όλα τις εξετάσεις της ομάδας FemoScan® όπως το Comprehensive, Screen UMC, TNC καθώς και τα FemoScan® 5 & 6.

Κάθε κιτ συλλογής δείγματος περιέχει

Οδηγίες λήψης δείγματος

Παραπεμπικό εξετάσεων

Στυλεούς για την απομόνωση γενετικού υλικού

Στυλεός με υλικό μεταφοράς Stuart

Συλλέκτης ούρων

Άθραυστη θήκη με απορροφητικό υλικό SpeciSafe®

Πλαστικό σακουλάκι με την ένδειξη "Biohazard"

Παγοκύστη

Χάρτινο κουτί συσκευασίας

Φάκελος επιστροφής

Έντυπο επιστροφής DHL

[μόνο στην περίπτωση αποστολής εκτός Ελλάδας]



Σημαντική Παρατίρηση: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε

Πώς να προετοιμαστείτε κατάληπη

Για 24 ώρες πριν τη συλλογή του δείγματος δεν πρέπει να έχετε σεξουαλική επαφή.

Η λήψη των δειγμάτων δεν πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.

Την ημέρα της συλλογής (1) μνη χρησιμοποιείτε κολπικές κρέμες ή υπόθετα και (2) μνη πλύνετε την περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Τοποθετήστε την παγοκύστη του κιτ στην κατάψυξη (-20°C) τουλάχιστον για 8 με 10 ώρες πριν την αποστολή του δείγματος.

Συμβουλές για τη συλλογή

➤ Απλώστε τα περιεχόμενα του κιτ συλλογής δείγματος πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια.

➤ Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι (αποφύγετε τα αιπολυμαντικά / αντισπιπτικά σαπούνια) έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επιμολύσεων.

Συμπλήρωση του Παραπεμπτικού εξετάσεων

Συμπληρώστε το παραπεμπτικό των εξετάσεων που συνοδεύει το κιτ, με όλα τα ζητούμενα στοιχεία.

Μνη ξεχάστε να γράψετε τις ζητούμενες εξετάσεις και να υπογράψετε.


Στα στοιχεία του Θεράποντος Ιατρού, σημειώστε το όνομα, το τηλέφωνο και το e-mail του γιατρού σας, για να τον ενημερώσουμε για τα αποτελέσματά σας.

Σήμανση του δείγματος

Χρησιμοποιώντας μπλε ή μαύρο στυλό, σημειώστε πάνω στους στυλεούς που περιέχονται στο κιτ, το **Όνομα** και το **Επίθετό** σας καθώς και την **Ημερομηνία Λήψης** του δείγματος. Μνη χρησιμοποιήστε μολύβι ή μαρκαδόρο γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεβάψουν.


5

Οδηγίες λήψης δείγματος - Λήψη Κολπικού Επιχρίσματος

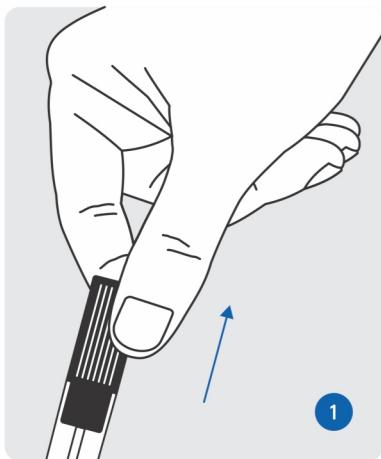

Κρατήστε τη θήκη του στυλεού με το ένα χέρι και με τό αλλο τραβήξτε το στυλεό προς τα έξω.


1

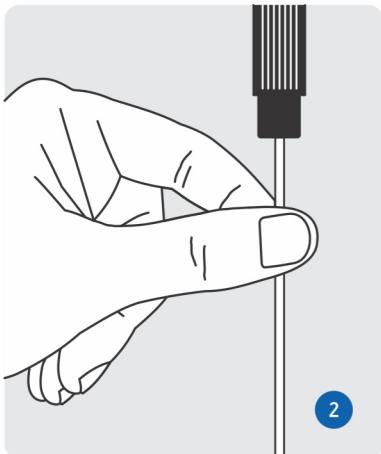

Κρατήστε το στυλέο από το στέλεχος του, λίγο χαμπλότερα από το καπάκι του.


2

6

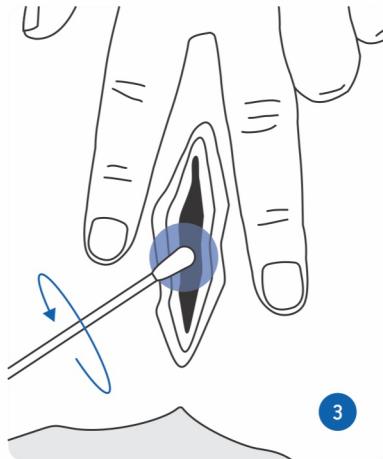

Συλλέξτε το δείγμα με τον τρόπο που δείχνει η εικόνα. Πολύ προσεκτικά εισάγετε τον στυλέο μέσα στον κόλπο μέχρι τα δάκτυλα σας να ακουμπίσουν τα χείλη του αιδοίου και με ήπιες κινήσεις περιστρέψτε τον στυλέο 3 - 4 φορές.

3

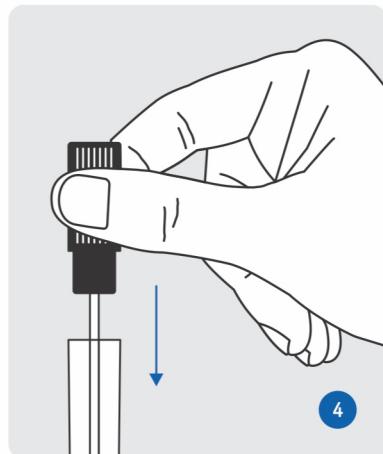

Κρατώντας τον στυλέο από το καπάκι του τοποθετήστε τον μέσα στη θήκη του. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τους υπόλοιπους 2 στυλεούς.


4

Οδηγίες λήψης δείγματος - Λήψη Ούρων



Την ίδια ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η λήψη των δειγμάτων με τους στυλεούς, θα πρέπει να γίνει και λήψη των πρώτων πρωινών ούρων. Η ούρη πρέπει να ξεκινήσει μέσα στο δοχείο συλλογής. Γεμίστε τον αυλλέκτη ούρων μέχρι περίπου το 1/3 του όγκου του.

1

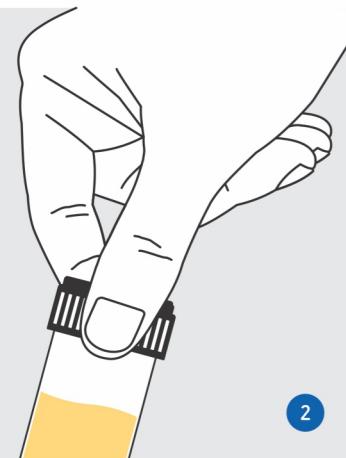

Βιδώστε καλά τον ουροσυλλέκτη και μέχρι την ολοκλήρωση της λήψης των στυλεών, αποθηκεύστε τον ουροσυλλέκτη στην κατάψυξη.

2

Αποστολή του δείγματος

Τα δείγματα πρέπει να φτάσουν στη Διαγνωστική Αθηνών εργάσιμες ημέρες.

Στείλτε το δείγμα αμέσως μετά τη συλλογή του.

Μην στέλνετε το δείγμα την Παρασκευή ή παραμονές αργιών.

Προγραμματίστε ώστε η συλλογή του δείγματος να γίνει Δευτέρα ως Πέμπτη και η αποστολή του στο εργαστήριο να γίνει την ίδια ημέρα.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη των στυλεών, μεταφέρετε τον ουροσυλλέκτη στην ειδική άθραυστη θήκη SpeciSafe® και κλείστε προσεκτικά το καπάκι της θήκης. Τοποθετήστε την θήκη SpeciSafe® μαζί με τους 3 στυλεούς στο πλαστικό σακουλάκι με την ένδειξη "Biohazard" και κλείστε το καλά, αφαιρώντας το προστατευτικό κάλυμμα της αυτοκόλλητης ταινίας.

Τοποθετείστε το σακουλάκι με τα δείγματα και την παγωμένη παγοκύστη μέσα στο χάρτινο κουτί συσκευασίας και κλείστε το. Τοποθετείστε το χάρτινο κουτί συσκευασίας μέσα στο φάκελο επιστροφής.

Καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της ACS Courier και στείλτε το δείγμα στη Διαγνωστική Αθηνών, **με χρέωση του παραλίπτη**.

Στην περίπτωση που βρίσκεστε **εκτός Ελλάδας** καλέστε τον τοπικό αντιπρόσωπο DHL και χρησιμοποιήστε το δελτίο επιστροφής της DHL.

Λήψη των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα σας αποσταλούν με τον τρόπο που επιλέξατε, συνήθως σε περίπου 2 - 10 ημέρες μετά την παραλαβή του δείγματος από τη Διαγνωστική Αθηνών και ανάλογα με το είδος των ζητούμενων αναλύσεων.



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο

-
- 📍 Λ. Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι 115 27, Αθήνα
 - 📞 210 7777654 / 210 7774569
 - ✉️ info@athenslab.gr
 - 🌐 eshop.athenslab.gr
 - 🌐 athenslab.gr

